

Diodcare VAC2000

RF Bipolar Ultrasónica de Liposucción y Cavitación



Principios y parámetros

Vac2000 utiliza ondas de Radio Frecuencia emite una onda de 40000HZ haciendo vibrar las células grasas favoreciendo su absorción. Además de utilizar la Vacuumterapia ayuda a disolver las grasas mediante el drenaje linfático contribuyendo a la elasticidad de la piel.

Montaje

El montaje es muy simple ya que cada conector es diferente y buscaremos la ranura adecuada.


Importante Asegurarse que en el conector de la Vacunterapia está debidamente introducido en su ranura y ajustado correctamente. Si no se conecta correctamente perderá succión.



Menú principal



- **Cavitación**
- **Vacumterapia Bipolar**
- **RF Sextapolar para Corporal**
- **RF Tetrapolar para Facial**
- **RF Tripolar para Ojeras**

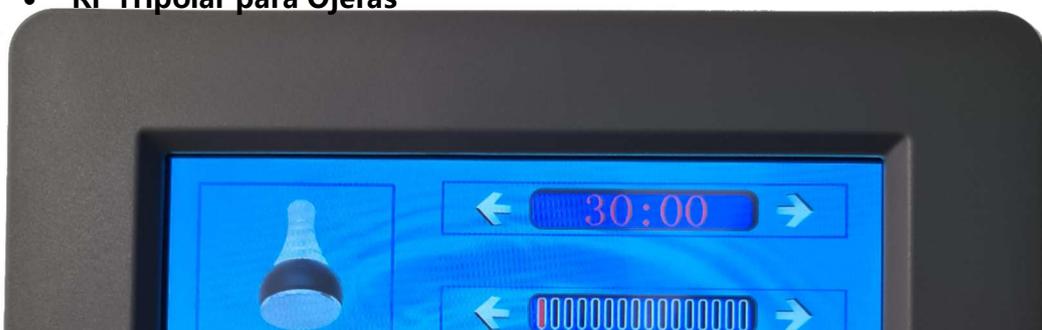

1.- Cavitación

Es un tratamiento indoloro donde se emplean ultrasonidos de baja frecuencia sobre la zona donde se ha localizado la grasa, rompiendo así la membrana celular de los adipocitos, favoreciendo a la eliminación de la grasa localizada y mejorando el aspecto de la piel de naranja.

- Podremos elegir en primer lugar el tiempo de utilización.
- Podemos elegir la potencia que iremos ajustando de manera progresiva

Modos

- A.** Es un trabajo continuo durante 3 segundos y discontinuo durante 2 segundos.
- B.** Es un trabajo continuo durante 4 segundos y discontinuo durante 3 segundos.
- C.** Es un trabajo continuo durante 1 segundo y discontinuo durante 1 segundo.
- D.** Es un trabajo continuo durante 0,5 segundos y discontinuo durante 0,5 segundos.

Características de la cavitación: Salida de energía: 150v, Frecuencia 40HZ, Potencia 25W



2. Vacumterapia Bipola RF

Empleamos la tecnología de radiofrecuencia **bipolar** para que puedas remodelar el cuerpo, rejuvenecer la piel, tensar el cutis, reducir la grasa y eliminar la celulitis.

La vacumterapia es un tratamiento no invasivo para combatir la celulitis de primer nivel. Se emplea mediante aparatos succionadores que drenan el tejido adiposo movilizándolo la grasa hacia el sistema linfático.

- En primer lugar tenemos la selección de tiempo.
- En segundo lugar la intensidad de la Radiofrecuencia.
- S = Seleccionador de Potencia de succión.
- R = Frecuencia de repetición de la succión.

Características de la vacumterapia: Salida de energía: 66v, Frecuencia 450K, Potencia 95W



2. RF Sextopolar para cuerpo.

La **radiofrecuencia** es una técnica utilizada en medicina estética para combatir la flacidez y la celulitis y que consiste en la aplicación de radiaciones electromagnéticas que provocan el calentamiento de las diferentes capas de la piel.

- En primer lugar tenemos el selector de tiempo
- En segundo lugar tenemos el selector de aumento o disminución de la radiofrecuencia.

Características del RF Sextopolar: Salida de energía: 66v, Frecuencia 550K, Potencia 50W.



2. RF Tetrapolar para facial

La novedosa radiofrecuencia **tetrapolar combina** simultáneamente los efectos de la monopolar, la bipolar y la tripolar en un único tratamiento que ofrece mejores resultados y además no produce dolor.

- En primer lugar tenemos el selector de tiempo
- En segundo lugar tenemos el selector de aumento o disminución de la radiofrecuencia.

Características del RF Tetrapolar: Salida de energía: 66v, Frecuencia 450K, Potencia 35W.



2. RF Tripolar para ojeras

La **radiofrecuencia Tripolar para ojeras** es uno de los mejores métodos para conseguir tratar este sombreado y lograr mejorar la apariencia de la piel.

- En primer lugar tenemos el selector de tiempo
- En segundo lugar tenemos el selector de aumento o disminución de la radiofrecuencia.

Características del RF Tripolar: Salida de energía: 66v, Frecuencia 450K, Potencia 35W.

Características:

- Para utilizarlo no es necesario ningún tipo de anestesia ni cirugía.
- No causa daños en la piel. Así como sangrados, hinchazón, etc.
- No tiene efectos secundarios.
- Es un tratamiento no invasivo.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación 220v/50HZ

Potencia 130W

Para cualquier duda o consulta puede escribirnos por email a info@nutrideon.es

Gracias por su confianza.



Dispone de 2 años de garantía Oficial.

NUTRIDEON S.L.

CIF: **B-86487097**